

# MetalClean<sup>®</sup>

med SolidSafe™ teknologi



- ▲ En kapsel MetalClean (4kg) motsvarar ≈ 80L flytande konzentrat
- ▲ Miljövänlig formulering utan EDTA, NTA och fosfater
- ▲ Minskar transportbehov och plastavfall med >95% jämfört med traditionella flytande konzentrat
- ▲ CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
- ▲ Uppfyller standarden för diskdesinfektorer, ISO 15883

## Milt alkaliskt högkoncentrerat maskindiskmedel i fast form för bruk tillsammans med SolidSafe™-dispenser i diskdesinfektorer

- ▲ MetalClean<sup>®</sup> är ett alkaliskt maskindiskmedel i fast form för medicinska instrument med utmärkt rengöring av typisk nedsmutsning som t ex blod, protein och serum.

Produkten är formulerad för att kombinera effektiv smutslösning med hög material-kompabilitet samt skonsamhet mot diskgodset. MetalClean<sup>®</sup> har genomgått omfattande tester på instrument av anodiserat aluminium med goda resultat. Vi rekommenderar dock att testa ert specifika anodiserade aluminiumgods före användning för att bekräfta kompabiliteten.

- ▲ **Bruksanvisning:** Beroende på vattnets kvalitet rekommenderas en dosering på ca 3–6 ml/L (0,3-0,6%) av konzentratet som produceras av SolidSafe-dispensern genom diskdesinfektorns alkaliresistenta doseringspump. MetalClean<sup>®</sup> förhindrar kalkbeläggningar i maskin, munstycke och rörledningar. **Endast för professionell användning.**
- ▲ **Teknisk information:** Kemisk sammansättning: Natriumhydroxid, komplexbildare, korrosionsinhibitor samt hjälpämnen | pH-värde flytande konzentrat (producerat med 20° C kranvatten): ~13,4 | pH-värde i brukslösning (3ml/L i 20° C avjoniserat vatten) ~11,0 | Densitet (20° C): 1,56 g/ml | Konduktivitet (3ml/L i 20° C avjoniserat vatten): ~328 µS/cm.
- ▲ **Förpackningar:** Art. Nr: 3071020      2x4kg