

MetalClean[®] Plus

med SolidSafe[™] teknologi



- ▲ En kapsel MetalClean Plus (4kg) motsvarar ≈ 80L flytande koncentrat
- ▲ Miljövänlig formulering utan EDTA, NTA och fosfater
- ▲ Minskar transportbehov och plastavfall med >95% jämfört med traditionella flytande koncentrat
- ▲ CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
- ▲ Uppfyller standarden för diskdesinfektorer, ISO 15883

Milt alkaliskt högkoncentrerat maskindiskmedel i fast form för bruk tillsammans med SolidSafe[™]-dispenser i diskdesinfektorer

- ▲ MetalClean[®] är ett alkaliskt maskindiskmedel i fast form för medicinska instrument med utmärkt rengöring av typisk nedsmutsning som t ex blod, protein och serum.

Produkten är formulerad för att kombinera effektiv smutslösning med hög material-kompatibilitet samt skonsamhet mot diskgodset. MetalClean[®] Plus har genomgått omfattande tester på instrument av anodiserat aluminium med goda resultat. Vi rekommenderar dock att testa ett specifika anodiserade aluminiumgods före användning för att bekräfta kompatibiliteten.

- ▲ **Bruksanvisning:** Beroende på vattnets kvalitet rekommenderas en dosering på ca 3–6 ml/L (0,3-0,6%) av koncentratet som produceras av SolidSafe-dispensern genom diskdesinfektorns alkaliresistenta doseringspump. MetalClean[®] Plus förhindrar kalkbeläggningar i maskin, munstycke och rörledningar.

Endast för professionell användning.

- ▲ **Teknisk information:** Kemisk sammansättning: Natriumhydroxid, komplexbildare, korrosionsinhibitor samt hjälpämnen | pH-värde flytande koncentrat (producerat med 20° C kranvatten): ~13,0 | pH-värde i brukslösning (3ml/L i 55° C avjoniserat vatten) 9,9-10,5 | Densitet (20° C): 1,03 g/cm³ | Konduktivitet (3ml/L i 20° C avjoniserat vatten): ~212 µS/cm.

- ▲ **Förpackningar:** Art. Nr: 3071100 2x4kg

ECOLAB AB
 BOX 164, 125 24 Älvsjö,
 Armorstsvägen 1, 125 44 Älvsjö
 Tel: +46 8 603 22 00 Fax: +46 8 603 22 38
 www.se.ecolab.eu

CE TILLVERKARE
 Ecolab Deutschland GmbH
 Postfach 130406
 D-40554 Düsseldorf
 +49-211-9893-0

ECOLAB[®]