

SEKUMATIC® FKN



- ▲ pH-neutralt torkmedel för kirurgiska instrument samt annan medicinsk utrustning
- ▲ Fläckfri torkning av kirurgiska instrument, behållare, vagnar och sängar
- ▲ CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
- ▲ Uppfyller standarden för diskdesinfektorer, ISO 15883

pH-neutralt torkmedel för reducering av torktiden i diskdesinfektorer

- ▲ Sekumatic® FKN är ett flytande pH-neutralt tork- och avspänningsmedel som reducerar torktiden och motverkar uppkomst av beläggningar

Produkten är formulerad med korrisionsinhibitorer för skydd av metallinstrument och maskiner.

- ▲ **Bruksanvisning:** Sekumatic® FKN används främst för att underlätta torkningen av produkter i rostfritt stål som t ex kirurgiska instrument, behållare, vagnar och sängar. Produkten kan även användas till laboratorieglass samt föremål av plast och elastomerer (t ex gummi)
Endast för professionell användning.

För att underlätta torkningen av kirurgiska instrument samt annan medicinsk utrustning rekommenderas en dosering på ca 0,3-1 ml/L i den slutgiltiga sköljfasen.

Till kabinettmaskiner rekommenderas en dosering på 1-2 ml/L.

- ▲ **Teknisk information:** Kemisk sammansättning: Icke-joniska tensider, pH-värde koncentrat: 7,0, Densitet: 1,02 g/ml.
- ▲ **Förpackningar:**

Art. Nr: 3029830	3x5L
Art. Nr: 3026570	1x20L
Art. Nr: 3026580	1x200L