

# SEKUMATIC® FNP



- ▲ Passar alla vattenhårdheter
- ▲ Fritt från tensider
- ▲ CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC

## Fosforsyrebaserat neutraliseringsmedel och avkalkningsmedel för disk/spoldesinfektorer

- ▲ Sekumatic® FNP är formulerad för neutralisering efter alkalisk rengöring av kirurgiska instrument beroende på vattenkvalitet. Produkten kan även användas som avkalkningsmedel till disk/spoldesinfektorer samt till ytrestaturering av rostfria instrument.
- ▲ **Bruksanvisning:** Sekumatic® FNP kan användas till produkter i rostfritt stål som t ex kirurgiska instrument, behållare, vagnar och sängar. Produkten kan ej användas till restaurering av instrument av alumium. **Endast för professionell användning.**

För att neutralisering efter alkalisk rengöring av kirurgiska instrument samt annan medicinsk utrustning rekommenderas en dosering på ca 1-3 ml/L. Avjoniserat vatten bör helst användas i den slutgiltiga sköljfasen.

För avkalkning, dosera 1-25 ml/l Sekumatic® FNP beroende på mängden kalk och låt maskinen gå i minst 10 min.

- ▲ **Teknisk information:** Kemisk sammansättning: Fosforsyra, pH-värde koncentrat: < 1, pH-värde i brukslösning (20 °C) 2,3-3,0, Densitet: 1,45 g/ml.
- ▲ **Förpackningar:** Art. Nr: 3015770 3x5L