



## ENKEL FÖRRENGÖRING AV INSTRUMENT

### Aniosyme Foam

#### BRUKSLÖSNING I SKUMFORM FÖR MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT

Skumspray för rengöring av medicinska och kirurgiska instrument. Säkerställer optimal upplösning av föroreningar på instrument efter längre vilotid (upp till 72 timmar) eller före maskinbearbetning.

Aniosyme Foam är:

- **ENKELT** - Enkel att använda
- **SNABBT** - Förhindrar intorkning av orenheter
- **EFFEKTIVT** - Stabilt skum med god vätande effekt



# Aniosyme Foam

Färdigt att använda förbehandlingskum för medicinska och kirurgiska instrument



Aniosyme Foam  
Skumspray

## ENKELT

Enkel att använda.

## SNABBT

Förhindrar intorkning av orenheter.

## EFFEKTIVT


Stabilt skum med god vätande effekt.

| VI ERBJUDER                                      | ERA FÖRDELAR                              | ANIOSYME FOAM |
|--|---|---------------|
| ENKELT - Enkel att använda.                      | Brukslösning i användarvänlig flaska      | Ja            |
| SNABBT - Förhindrar intorkning av orenheter.     | Underlättar ytterligare förberedelser     | Ja            |
| EFFEKTIVT - Stabilt skum med god vätande effekt. | Starta förberedelse redan under operation | Ja            |

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Färdigt förbehandlingskum för optimal lösning av orenheter på instrument som blir stående längre tider (upp till 72 timmar) eller före maskinbearbetning. Förhindrar intorkning av orenheter och gör förrengöring enklare med en god rengörande effekt. Det tjocka skummet garanterar jämn täckning av instrumentytan. Aniosyme Foam har bred materialkompatibilitet. Ej lämpligt för instrument av zink eller järn.

## INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV ANIOSYME FOAM

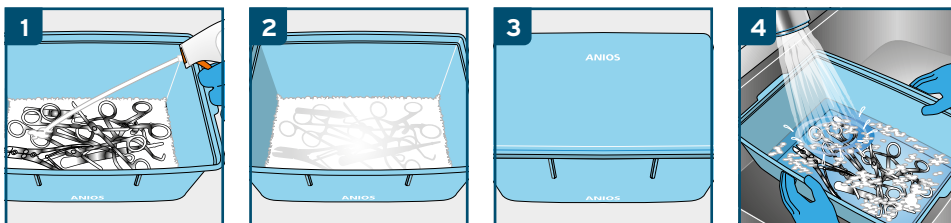

**1.** Spraya i förväg botten på blötlägningsbacken med Aniosyme Foam och placera därefter instrumenten.

**2.** Täck alla instrument med skum.

**3.** Täck backen med locket.

**4.** Skölj behandlade medicintekniska produkter noggrant med kranvatten för att avlägsna alla spår av produkt och organiska orenheter.

## BESTÄLLNINGSPÅGIFTER

| PRODUKT       | FÖRPACKNINGSTORLEK  | ARTIKELNUMMER |
|---------------|---------------------|---------------|
| Aniosyme Foam | 12 x 750 ml flaskor | 3105360       |



**CE** LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Levererad Av:  
**ECOLAB AB**  
Glasfibergatan 10  
Box 164, SE-125 24 Älvsjö  
+46 (0)8 603 22 00  
www.ecolab.se

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Rengöring av medicinska och kirurgiska instrument: för torrtransport eller före maskinrengöring. Håller en tillräcklig hög fuktighet för att undvika att blod och andra organiska föroreningar torkar in.

## INSTRUKTIONER

1. Spraya i förväg botten på blötlägningsbacken med Aniosyme Foam och placera därefter instrumenten.
2. Täck alla instrument med skum.
3. Täck backen med locket.
4. Skölj behandlade medicintekniska produkter noggrant med kranvatten för att avlägsna alla spår av produkt och organiska orenheter.

## INNEHÅLL

Icke-joniska tensider, enzymer (proteas, lipas, amylas), komplexbildare, hjälpämnen.

## LAGRING

Vidta försiktighetsåtgärder vid användning (upprättade enligt gällande europeiska regler för klassificering och märkning av kemiska produkter). Lagring: mellan +5°C and +25°C.

## CERTIFIKAT

På begäran tillhandahåller vi certifikat.

## MEDICINTEKNISK PRODUKT

Vidta försiktighetsåtgärder.



ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

**ECOLAB**

www.ecolab.se